

仕様

製品名	アトラスラインHL
型番	50300053
全幅	2000mm
高さ	1800~2200mm
奥行	1000mm

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または日本ケアリフトサービス株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先

日本ケアリフトサービス株式会社

Tel. **0120-188-027**

受付時間／平日 9:00~18:00

FAX.072-777-8857

日本ケアリフトサービス株式会社

〒664-0871 兵庫県伊丹市堀池5-1-8


© 2019 WELLNET. Lab



取扱説明書

アトラスラインHL

型番：50300053

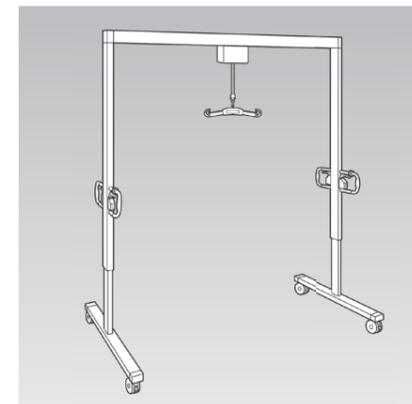

- このたびは、アトラスラインHLをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書には、アトラスラインHLを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
 - 取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
 - お買い上げの製品は、改良などにより、取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
 - 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。
特別なものを除き取扱説明書では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
 - ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管してください。
※併用する介護リフトなどの取扱説明書の「安全上のご注意」も必ずお読みください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明



警告

死亡や重傷を負う
おそれがある内容



注意

傷害や財産損害が発生
するおそれがある内容



してはいけない内容



実行しなければ
ならない内容

警告



禁止

最大使用者体重を超える方を吊り上げない

リフトには最大使用者体重が定められています。リフトの最大使用者体重を超える方を吊り上げると破損・変形して、けがをするおそれがあります。



禁止

リフトで人を吊り下げた状態で移動しない

転倒・落下など思わぬけがをするおそれがあります。



必ず守る

使用する際は、必ずキャスターのロックをかける

ロックを解除した状態で使用すると転倒・落下などで思わぬけがをするおそれがあります。




必ず守る

一人でレールを上げ下げするときは、低くなる側にリフトを寄せてから作業を行う

リフトが動いて、転倒などで思わぬけがをするおそれがあります。


使いかた

○各部の名前

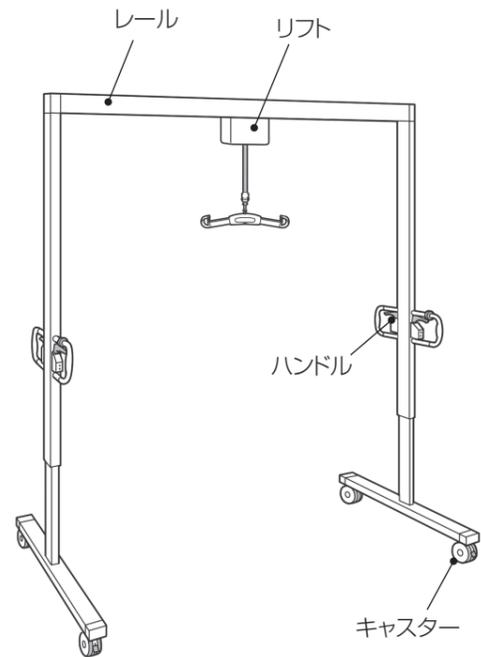


移動する

リフトの配線を外し、レールを下げて移動する

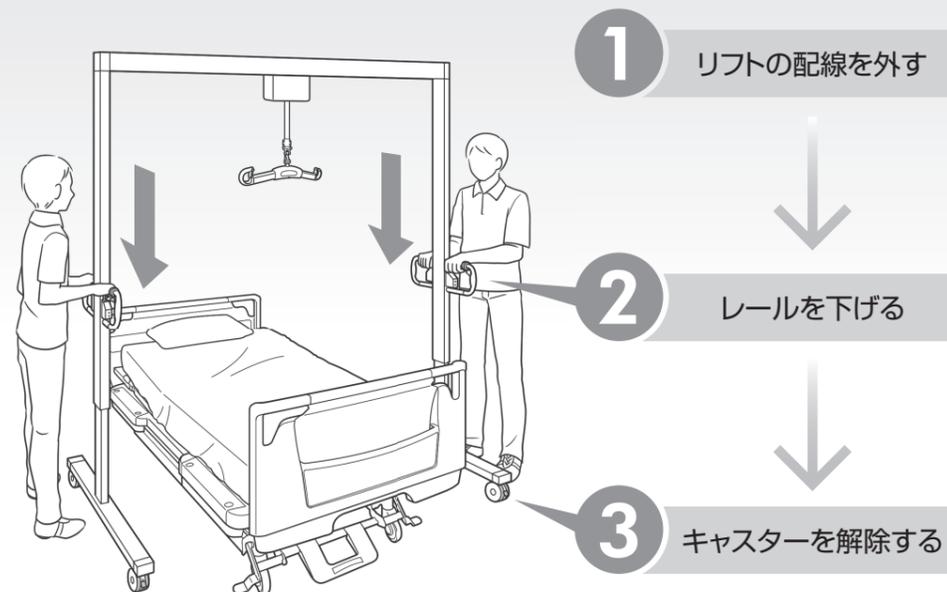

設置する

設置位置でキャスターを固定して、レールを上げる

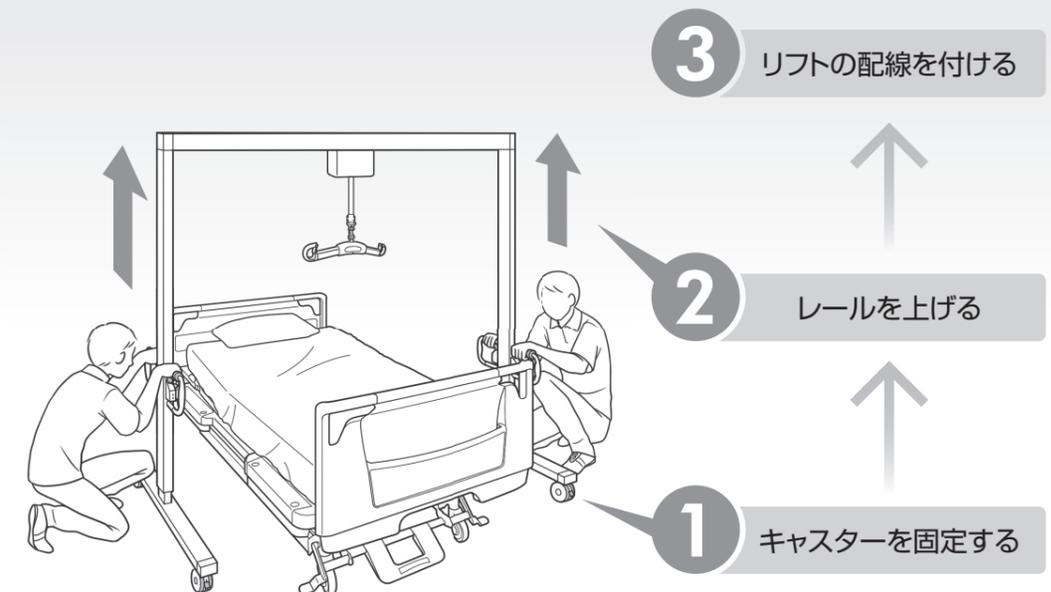


⚠ 警告

必ず守る 一人でレールを上げ下げするときは、低くなる側にリフトを寄せてから作業を行う
リフトが動いて、転倒などで思わぬけがをするおそれがあります。




○レールを下げる／上げる

1 レバーストッパーをスライドさせて、ハンドルのロックを解除する

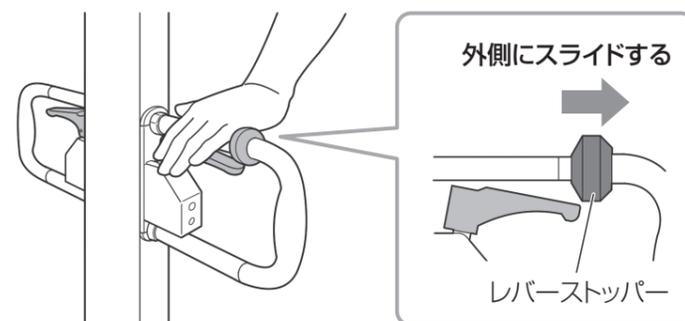

2 両手でハンドルを握りながら、上げ下げする

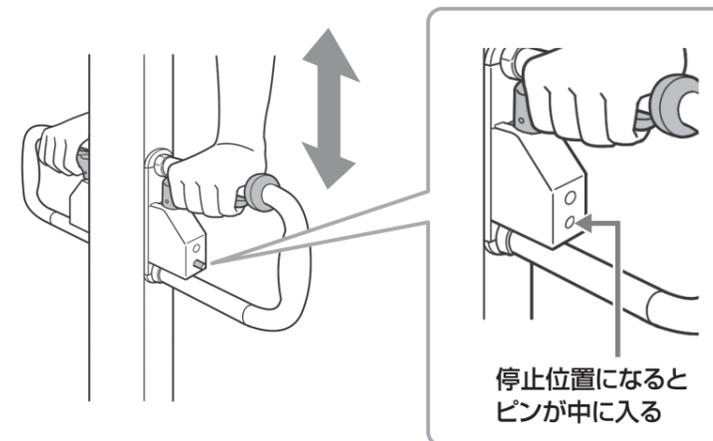


重要

使用する際は、必ずピンが中に入っていることを確認してください。

○キャスターの固定／解除

固定

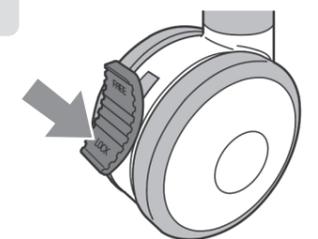

解除

